




Goldeneye  
THE MICROPIGMENTATION COMPANY

# AIRTRONIC

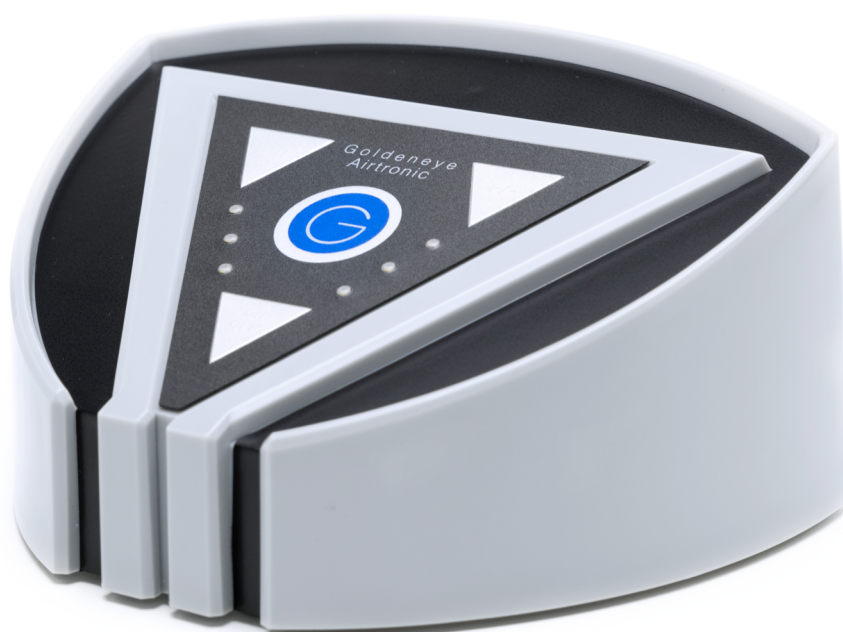

Manual de usuario

User Manual



## AIRTRONIC

### **Partes que incluye**

#### **Parts included**

**1 Goldeneye Airtonic Unit**

**1 Power supply**

**Input:**

**100-240 V ~ 50-60 Hz**

**Output:**

**12 VDC, max. 1000 mA 12 W max.**

**1 Dermograph Air**

**1 Cable for handpiece**

**1 Footswitch**

### **Instrucciones de seguridad**

#### **Safety instructions**



Antes de usar el producto por primera vez, lea el manual de instrucciones.  
¡Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias u otros usuarios!

Before using the product for the first time, read instruction manual. Keep the instruction manual for later reference or other users!



¡En caso de daños, NO use el dispositivo y desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica! (electricidad)

In case of damage do NOT use the device and unplug it from the mains (electricity) immediately!



¡No usar en lugares húmedos!  
Do not use in damp locations!



¡Sólo para uso en interiores!  
For indoor use only!


Temperatura de funcionamiento 15°C - 40°C  
Operating temperature 15 - 40 °C!

## AIRTRONIC

### Guía de inicio

### Getting started guide

- Conecte a la corriente el cable de alimentación (12 VDC, 1000mA) que se incluye en la parte posterior de la unidad.  
Plug the power cable (12 VDC, 1000 mA) that is included into the power supply.
- Conecte el Airtronic de Goldeneye al conector de alimentación en la parte posterior de la unidad **(1)**.  
Connect the Goldeneye Airtronic to the power connector at the back of the unit **(1)**.
- Conecte el cable de la pieza de mano en la parte posterior de la unidad **(2)**.  
Connect the handpiece with the cable at the back of the unit **(2)**.
- Conecte el cable del conmutador de pedal en la parte posterior de la unidad **(3)**.  
Connect the Foots witch cable at the back of the unit **(3)**.
- La unidad estará lista para ser utilizada.  
The unit will be ready to be used.

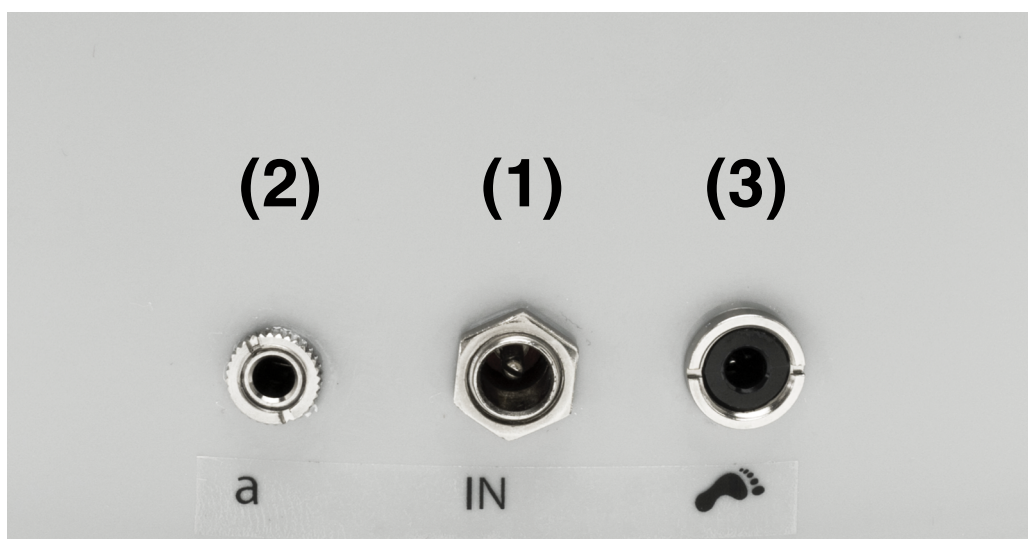


## AIRTRONIC


### Instrucciones de uso

### Instructions for use


- Pulse **On / Off** (encender/apagar) para activar el dispositivo.  
Press **On / Off** to switch ON the device.

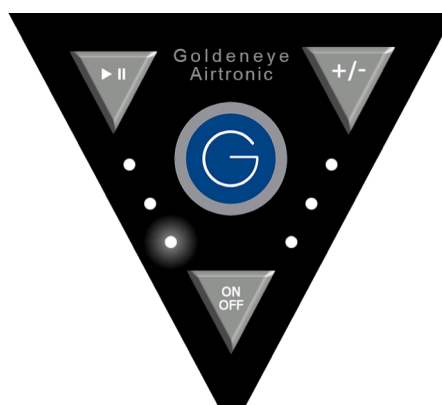

- Pulse **Inicio / Parada** para que la pieza de la mano se ponga en marcha.  
Press **Start / Stop** - handpiece will start working.

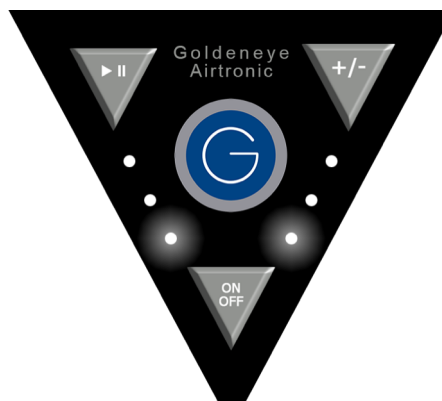

- Pulse **Más / Menos** para cambiar de velocidad.  
Press **Plus / Minus** to change speed.

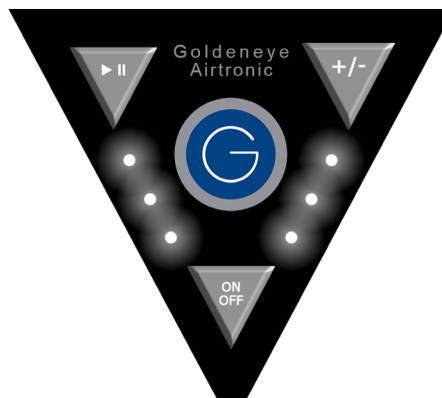




## AIRTRONIC


### Instrucciones de uso

### Instructions for use

- Pulse **Inicio / Parada** o utilice el conmutador de pedal para pausar el trabajo.  
Press **Start / Stop** or use the footswitch to pause the work.

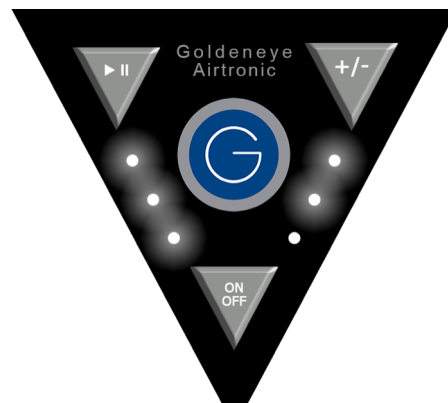

- Pulse **On / Off** (encender/apagar) para apagar el dispositivo.  
Press **On / Off** to switch OFF the device.

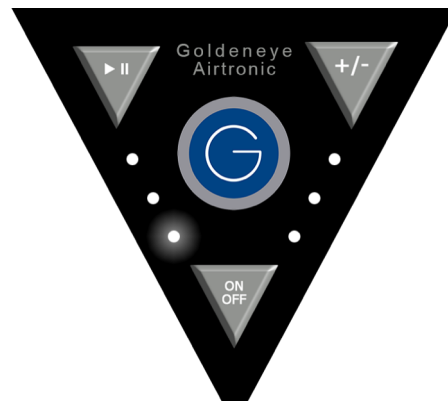

## AIRTRONIC



### **Datos técnicos**

Clase de protección: 2  
Voltaje: 12 VDC  
Consumo eléctrico: 12 VA

### **Technical Data**

Protection Class: 2  
Voltage: 12 VDC  
Power: 12 VA

### **Transporte / almacenamiento / condiciones de uso:**

Transporte únicamente en el embalaje original del fabricante.

Temperatura de transporte y almacenamiento: entre 0 °C y 50 °C.

Temperatura de funcionamiento: entre 15 °C y 40 °C.

Humedad relativa: máx. 90 %, sin condensación. Evítense cambios bruscos de temperatura, podrían causar condensación en el dispositivo.

Actívese el aparato solo con una temperatura óptima.

### **Transport / storage / conditions of use:**

Transport only in the manufacturer's original packaging.

Transport and storage temperature: between 0 °C and 50 °C.

Operating temperature: between 15 °C and 40 °C.

Relative humidity: max. 90%, without condensation. Avoid sudden changes in temperature, which could cause condensation in the device.

Activate the device only at an optimum temperature.

## AIRTRONIC



### **Instrucciones de eliminación**

Deseche el embalaje, el equipo, los cables y los accesorios de manera respetuosa con el medio ambiente.

Todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado de los residuos domésticos.

### **Removal instructions**

Dispose of packaging, equipment, cables and accessories in a respectful manner with the environment.

All electrical and electronic products must be disposed of separately of household waste.



# Goldeneye

THE MICROPIGMENTATION COMPANY



Galardonados con premios continuos desde 2009 · Categorías del Foro de belleza maquillaje permanente

Continual Award Laureates Since 2009 · Beauty Forum Categories permanet makeup

© Copyright 2018 de Goldeneye GmbH, cambios y erratas reservados · Imágenes de Goldeneye · Febero 2018